



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-05
CODE	FIX-KD-05
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-05



1. **PL:** Przyłóż ortezę do nogi.  
**EN:** Place the brace on the leg.

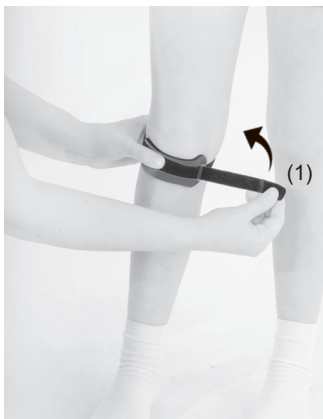

2. **PL:** Przepleć pasek przez klamerkę (1) i zapnij rzep (2).  
**EN:** Interlace the strap through the buckle (1) and fasten the Velcro closure (2).

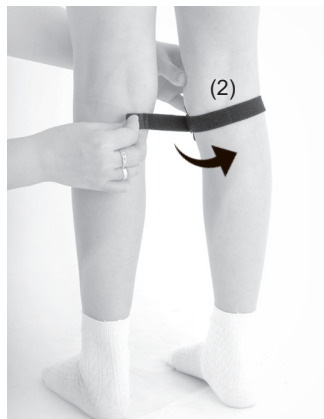

3. **PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.