

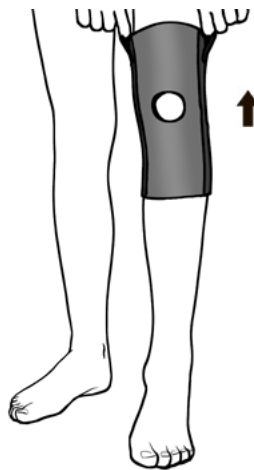



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-08
CODE	FIX-KD-08
TRADE NAME	LOWER LIMB SUPPORT
MODEL	FIX-KD-08

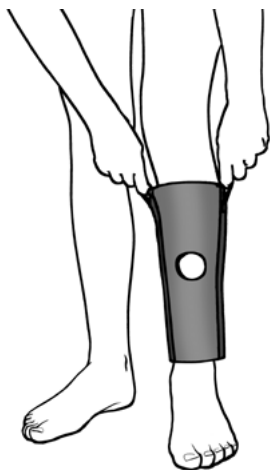


- PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put on the orthosis on the leg.
- PL:** Za pomocą uchwytów podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym.
EN: Using the grip handles, pull the brace up to keep the kneecap in the patellar hole.

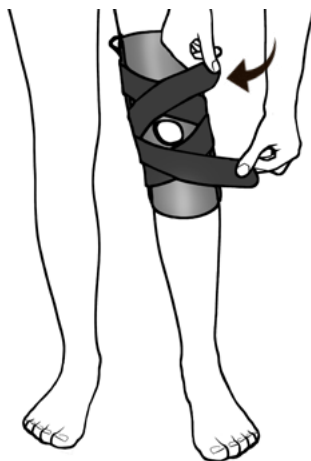


- PL:** Przypnij do wyrobu gumowe taśmy na rzep z zewnętrznej i wewnętrznej strony nogi.
EN: Attach hook strips to the product, inside and outside of the leg.

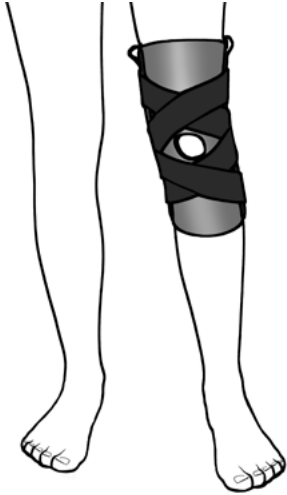

4. **PL:** Gotowy wyrób: stabilizacja ACL.
EN: Product is ready to use:
ACL stabilization.

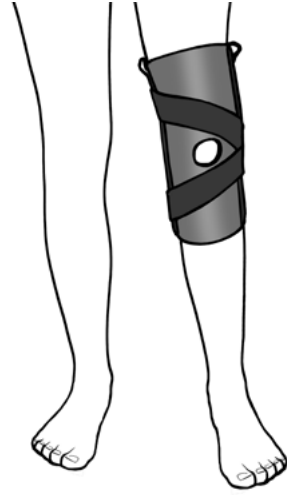

5. **PL:** Gotowy wyrób: stabilizacja MCL.
EN: Product is ready to use:
MCL stabilization.

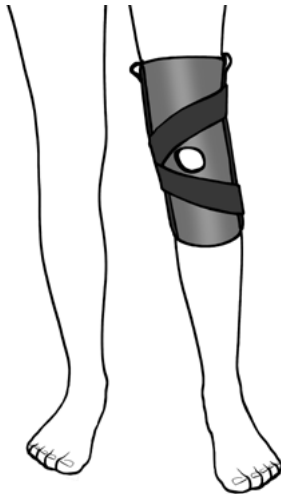

6. **PL:** Gotowy wyrób: stabilizacja LCL.
EN: Product is ready to use: LCL stabilization.