


KOD KATALOGOWY	FIX-KD-14
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-14
CODE	FIX-KD-14
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-14



- 1. PL:** Rozepnij klamry, aby przygotować ortezę do założenia.
EN: Unbuckle the brace.




- 2. PL:** Stabilizator zawsze zakładaj na siedząco. Przed zapięciem ortozy, zegary powinny być ustawione dokładnie po bokach stawu kolanowego (w linii szpary stawowej) w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości.
EN: The po-op knee brace should be put while seating. Before buckling the straps, the drop-locks should be on height of the femurs condyles (in joint space). The ROM should be adjusted according to the specialist recommendation.

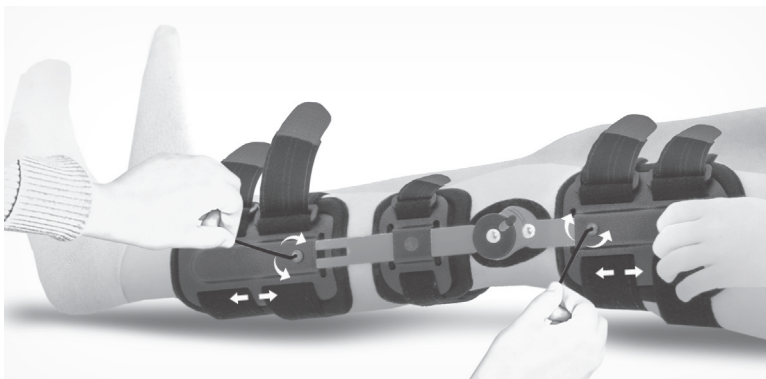

4. PL: Dopasuj długość ortozy. Jeśli jesteś wysoki/wysoka, zwiększ długość bocznych szyn udowych i piszczelowych za pomocą regulacji.

EN: Adjust the length of the brace. If you are tall, lengthen the side splints.

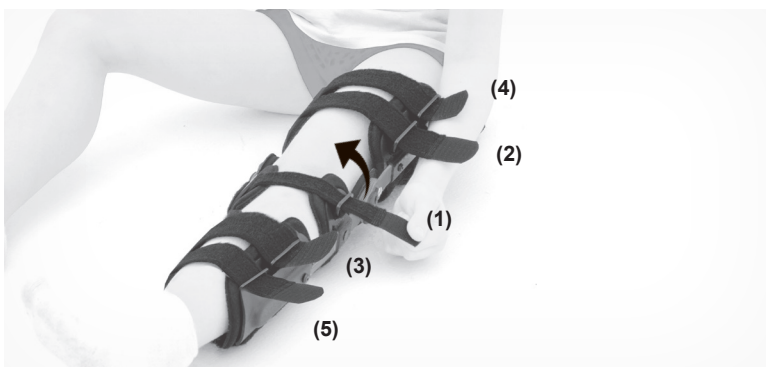

5. PL: Zapinanie ortozy zawsze zaczynaj od pasków leżących najbliżej stawu kolanowego.

EN: First, buckle the straps which are the closest to the knee.



6. PL: PAMIĘTAJ! Tylko prawidłowo założona orteza pozostaje w osi stawu kolanowego i przylega równomiernie do całej kończyny.

EN: REMEMBER! Only correct adjustment of the knee brace provides perfect fitting!