

KOD KATALOGOWY	FIX-KG-20
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-20
CODE	FIX-KG-20
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-20





1. PL: Załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby zegar szyny znajdował się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej.

EN: Place the orthosis on the upper limb but remember to place the drop-lock on the lateral epicondyle.


2. PL: Dopasuj długość szyny, tak aby ręka dziecka swobodnie obejmowała uchwyt dłoniowy szyny.

EN: Adjust the length of the splint. The child should grip the handle easy.

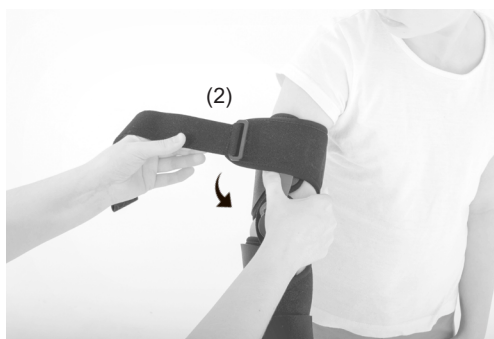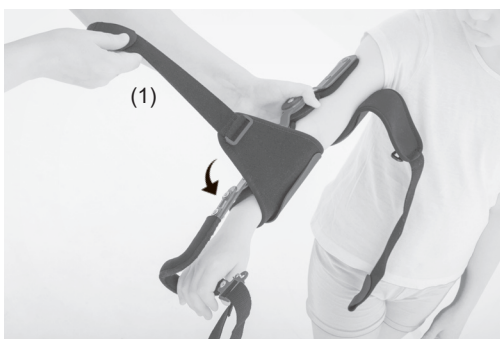

3. PL: Zapnij opaskę obwodową przedramienia (1) i ramienia (2).

EN: Fasten the wrap-around strap on the forearm (1) and arm (2).

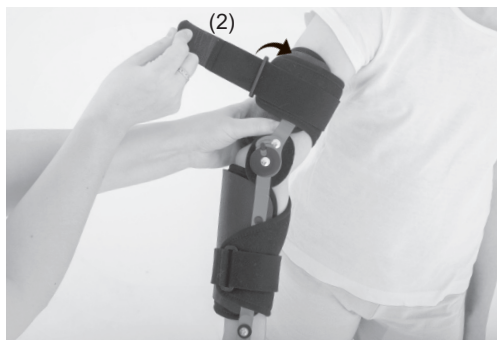


4. **PL:** Przepleć dolny (1) i górny pasek (2) obwodowy przez klamerkę i zapnij rzepy.
EN: Interlace the upper (1) and lower (2) strap through the buckle and fasten with Velcros.



5. **PL:** Załóż pasek na ramię według wskazanego kierunku i zapnij karabińczyk.
EN: Place the shoulder strap in the shown direction and chose it using the snap hook.



- 6. PL:** Ustaw odpowiednią długość temblaka.
EN: Adjust the required length of the shoulder strap.

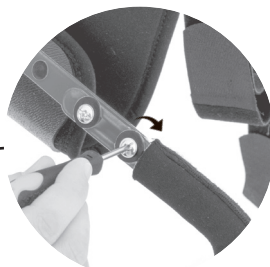

7. PL: UWAGA !

Po dokonanej regulacji długości szyny, należy upewnić się czy śruby szyny zostały prawidłowo dokręcone. Tylko prawidłowo dokręcone śruby szyny gwarantują bezpieczeństwo użytkowania wyrobu.

EN: ATTENTION !

After adjustment of the splints length, there is necessary to tighten the screws. Only tightened screws provide safety and effectiveness using the orthosis.



8. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.