

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-01
CODE	FIX-KD-01
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-01



1. PL: Odwiń dolny element ortozy w taki sposób, aby cała szerokość przedniego paska silikonowego znalazła się na zewnątrz ortozy.

EN: Unwrap the lower part of the brace, so that the entire width of the front silicone strap is outside the brace.

2. PL: Podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym.

EN: Pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut.



3. PL: Odwiń dolny element ortozy.

EN: Unwrap the lower part of the brace.

4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.