



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-06
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-06
CODE	FIX-KD-06
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-06

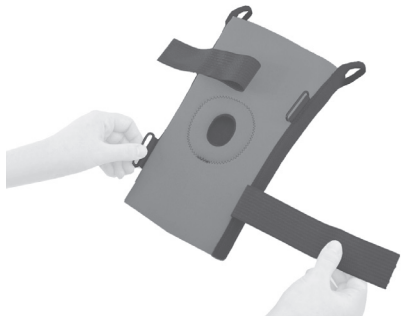

1. PL: Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i za pomocą uchwytów podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym (1).

EN: Unbuckle the straps, put the brace on the leg and pull it up, so that the kneecap is in the patellar donut (1).

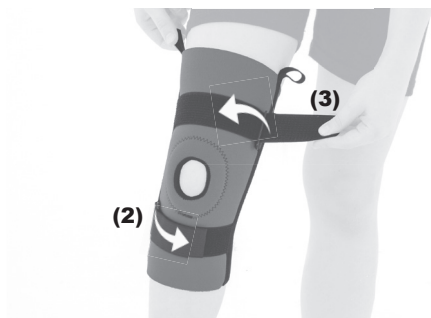

2. PL: Przepleć paski przez klamki i zapnij w podanej kolejności (2,3).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten them according to the following steps (2,3).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.