

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-08
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-08
CODE	FIX-KD-08
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-08


1. PL: Załóż ortezę na nogę i za pomocą uchwytów podciągnij ortezę do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okółorzepkowym.

EN: Place the brace on the leg and using the grip handles, pull the brace up to keep the kneecap in the patellar donut.



2. PL: Przypnij rzep do tylnej części wyrobu (1).

EN: Attach Velcro (1) to the back part of the brace.

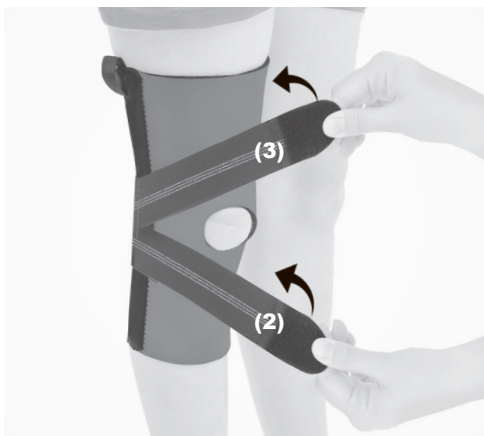

3. PL: Ustaw odpowiednią kompresję taśm elastycznych i zapnij rzepy (2 i 3).

EN: Set the appropriate compression of the elastic bands and fasten the Velcro (2 and 3).



- 4. PL:** Gotowy wyrób: stabilizacja MCL.
EN: Product is ready to use: MCL stabilization.



- 5. PL:** Gotowy wyrób: stabilizacja LCL.
EN: Product is ready to use: LCL stabilization.

PL: UWAGA! PACJENTOM CIERPIĄCYM NA KOŚŁAWOŚĆ LUB SZPOTAWOŚĆ ZALECA SIĘ STOSOWANIE ORTEZ NA OBIE NOGI RÓWNOCZEŚNIE.

EN: ATTENTION! PATIENTS SUFFERING FROM VALGUS OR VARUS KNEE ARE RECOMMENDED TO USE BOTH LEG BRACES AT THE SAME TIME