


KOD KATALOGOWY	FIX-KD-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-09
CODE	FIX-KD-09
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-09



- 1. PL:** Wypłec paski z klamerek i rozepnij ortezę.
EN: Remove the straps from the buckles and unfasten the brace.

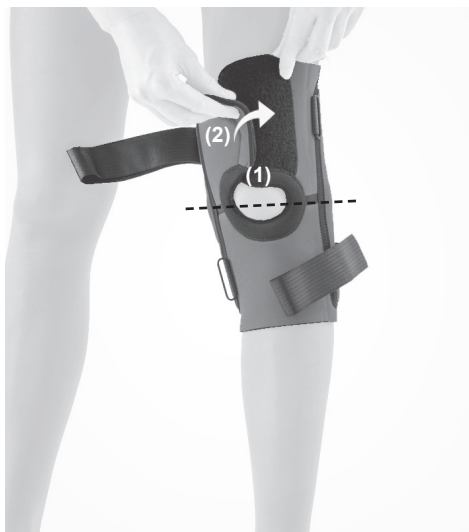

- 2. PL:** Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym (1), a zawiasy szyn znajdowały się w osi stawu kolanowego. Zapnij ortezę na rzepkę (2).
EN: Put the brace on the leg and pull it up, so that the kneecap is in the patellar donut (1) and the drop locks are in the axis of the knee joint. Fasten the Velcro (2).



3. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (3,4,5,6).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten in the given order (3,4,5,6).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.