

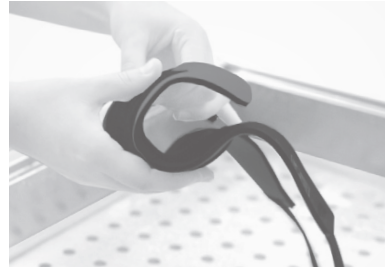



1 PL: GORĄCA WODA / WANNA MEMORY CAST
EN: HOT WATER / MEMORY CAST WATER BATH

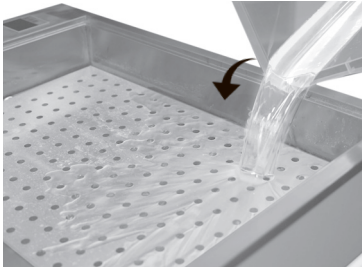

- 1. PL:** Wlej wodę do wanny i podgrzej do temp. 60-65^o C.
EN: Pour water into the bath and heat it up to 60-65^o C.
- 2. PL:** Rozepnij paski i rzepy ortozy.
EN: Loose straps and Velcro tapes.

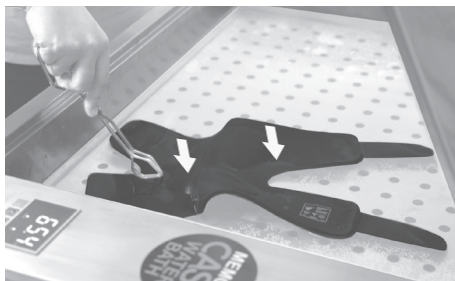


- 3. PL:** Umieść całą ortezę w wannie z wodą, zamknij pokrywę wanny i odczekaj chwilę aż orteza zmięknie.
EN: Place the entire orthosis in a bath filled with water, close its cover and wait a moment until the Memory Cast Panel is plastic.

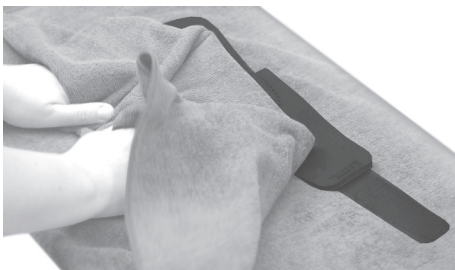


- 4. PL:** Gdy płyta stanie się całkowicie plastyczna, osusz ortezę ręcznikiem.
EN: When the panel is completely plastic, dry the orthosis with a towel.
- 5. PL:** Sprawdź czy orteza nie jest zbyt gorąca. Jeśli to konieczne, poczekaj aż ostygnie.
EN: Check if the orthosis is not too hot. If so, wait for it to cool down.

PL: UWAGA! Zamiast wanny można zastosować miskę z gorącą wodą.
EN: ATTENTION! Instead of a bath, you can use a bowl of hot water.


2 PL: PIEKARNIK / KOMBIWAR EN: OVEN / HALOGEN OVEN

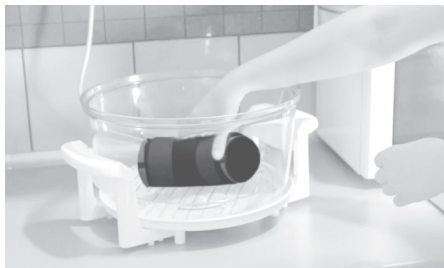

- 1. PL:** Odepnij pasy i rzepy. Włóż ortezę do urządzenia. Ustaw temperaturę 150°.
EN: Unfasten the straps and Velcro. Put the brace into the device. Set the temperature to 150 °.

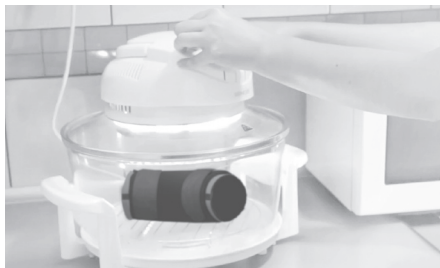


- 2. PL:** Podgrzewaj przez 5 minut.
EN: Heat for 5 minutes.

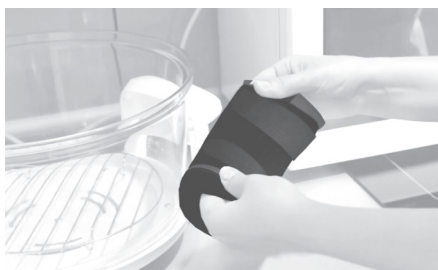


- 3. PL:** Sprawdź czy płyta jest miękka. Sprawdź czy orteza nie jest zbyt gorąca. Jeśli to konieczne, poczekaj aż ostygnie.
EN: Check if the brace is plastic. Check if the orthosis is not too hot. If so, wait for it to cool down.


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-09
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-09
CODE	FIX-KG-09
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-09

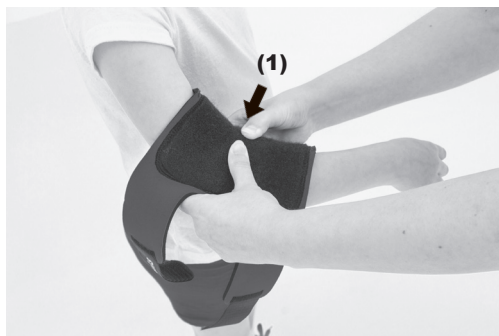

1. PL: Załóż ortezę na rękę (1).
EN: Put the brace on your arm (1).

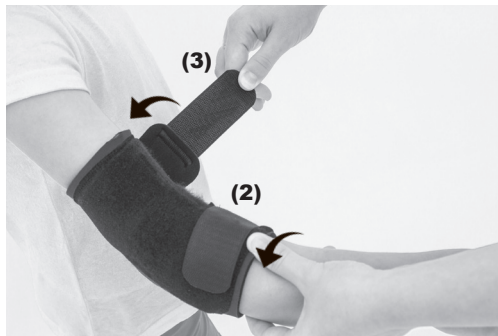

2. PL: Zapnij rzepy (2 i 3).
EN: Fasten with Velcros (2 and 3).

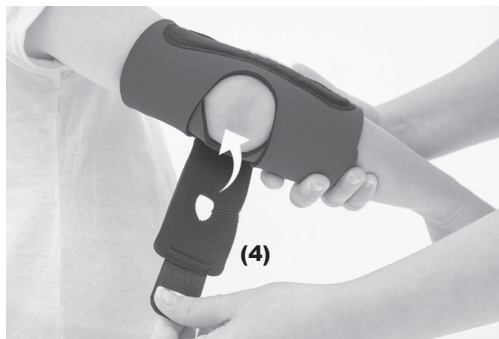

PL: UWAGA! MOŻESZ ZASTOSOWAĆ ORTEZĘ Z DODATKOWĄ OSŁONĄ ŁOKCIA (4).
EN: ATTENTION! YOU CAN USE THE BRACE WITH THE ADDITIONAL ELBOW COVER (4).



3. PL: Gotowy wyrób (opcja A i B).
EN: Product is ready to use (option A and B).