

KOD KATALOGOWY	FIX-KG-10
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-10
CODE	FIX-KG-10
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-10




- 1. PL:** Załóż ortezę na rękę i przepleć taśmę wokół nadgarstka.  
**EN:** Put the brace on the hand and wrap the strap around the wrist.



- 2. PL:** Zapnij rzep (1).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (1).



- 3. PL:** Przepleć pasek obwodowy wokół kciuka.  
**EN:** Wrap the strap around the thumb.

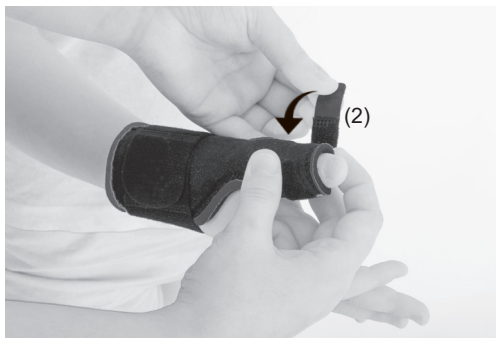

- 4. PL:** Zapnij rzep (2).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (2).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.