


KOD KATALOGOWY	FIX-T-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	FIX-T-01
CODE	FIX-T-01
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	FIX-T-01

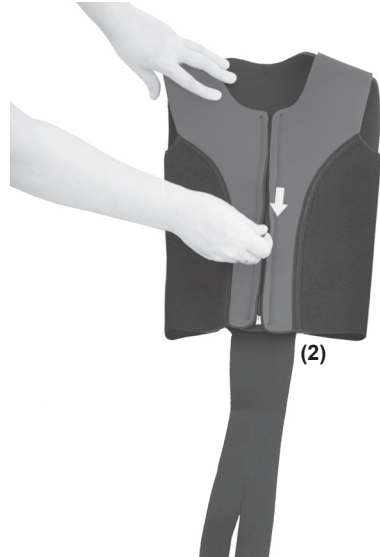


1. **PL:** Poluzuj tylne zapięcie (1) i rozsnuń suwak (2).
EN: Loose the back fastening (1) and pull the zipper down (2).



2. **PL:** Załóż ortezę na ramiona.
EN: Put the brace on your shoulders.



3. **PL:** Zasuń z przodu suwak.
EN: Slide the zipper at the front.

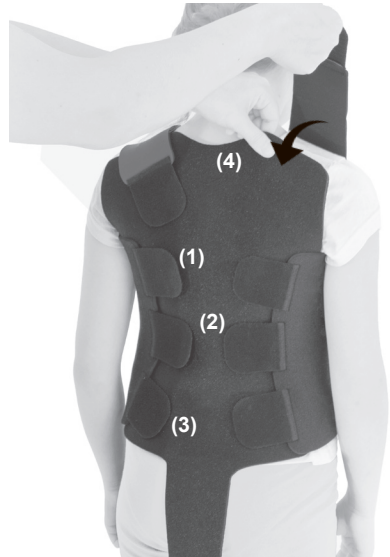

4. **PL:** Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij rzepy na zmianę (prawa i lewa) według podanej kolejności (1, 2, 3, 4).

EN: Set the required level of compression and fasten the Velcro in turns (right and left) according to the order (1,2,3,4).



5. **PL:** Zapnij pasek krocza z przodu kamizelki.

EN: Fasten the crotch tape in front of the vest.



6. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.