


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-12
CODE	FIX-KG-12
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-12



1. **PL:** Wsuń ortezę na ramię.
EN: Put the orthosis on the shoulder

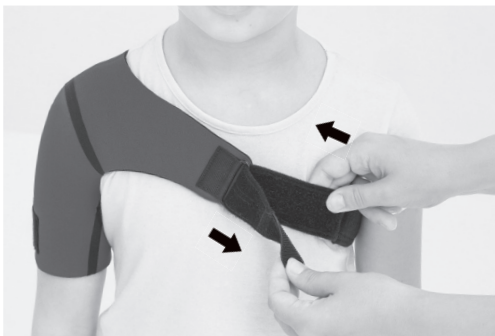

2. **PL:** Zapnij pas piersiowy.
EN: Fasten the chest belt.



3. **PL:** Zapnij pas piersiowy z tyłu.
EN: Fasten the belt at the back



4. **PL:** Zapnij rzep ramienny.
EN: Fasten the shoulder velcro.



5. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.