


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-14
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-14
CODE	FIX-KG-14
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-14


PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW II-III
EN: FINGERS IMMOBILIZATION II-III

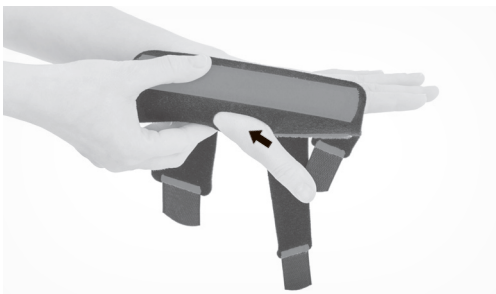


1. PL: Umieść kciuk w ortezie.
EN: Put the thumb in orthosis.



2. PL: Owiń najkrótszy pasek ortezy dookoła palca wskazującego i środkowego, jeśli nie możesz ukształtować szyny według potrzeb. Zapnij rzep (1).
EN: Wrap the shortest strap around index and middle fingers, if not, you can shape it. Fasten the Velcro closure (1).

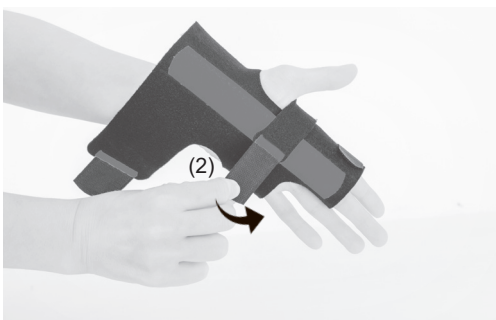

3. PL: Zapnij środkowy pasek (2).
EN: Fasten the middle strap (2).

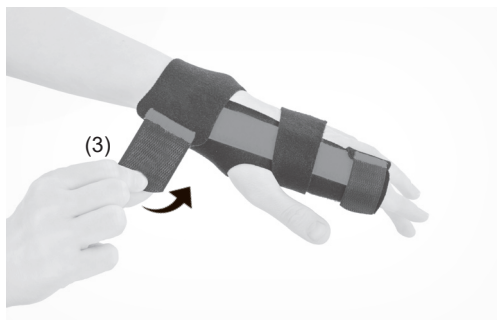

4. PL: Zapnij pasek na nadgarstku (3).
EN: Fasten the wrist strap (3).



5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.




PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW III-IV
EN: FINGERS IMMOBILIZATION III-IV



- 1. PL:** Zaaplikuj ortezę poprzez włożenie małego palca przez otwór.
EN: Apply the brace by putting small finger through the hole.



- 2. PL:** Zabezpiecz środkowy i serdeczny palec, jeśli nie możesz ukształtować szyny według potrzeb. Zapnij rzep (1).
EN: Secure the middle and ring fingers, if not, you can shape it. Fasten the Velcro closure (1).

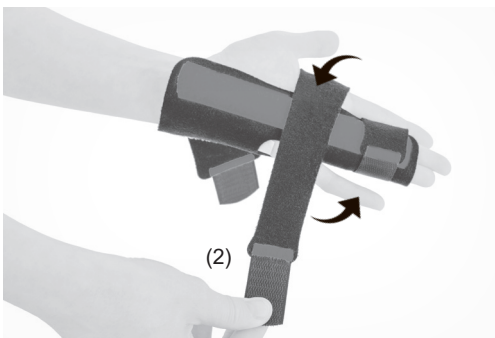

- 3. PL:** Zapnij środkowy pasek (2).
EN: Fasten the middle strap (2).





- 4. PL:** Zapnij pasek na nadgarstku (3).
EN: Fasten the wrist strap (3).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.





PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW IV-V
EN: FINGERS IMMOBILIZATION IV-V

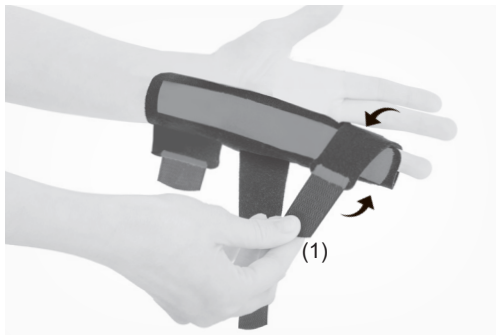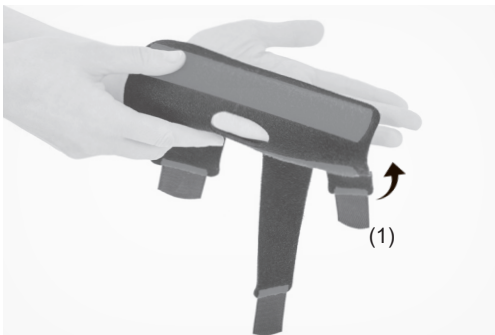

1. PL: Owiń najkrótszy pasek ortozy dookoła małego i serdecznego palca. Upewnij się czy profil szyny odpowiada krzywiznom śródreżca oraz nadgarstka, jeśli nie możesz ukształtować szyny według potrzeb. Zapnij rzep (1).

EN: Wrap the shortest strap of the brace around the little and ring fingers. Make sure the splint is anatomic shaped, if not, you can shape it. Fasten the Velcro closure (1).

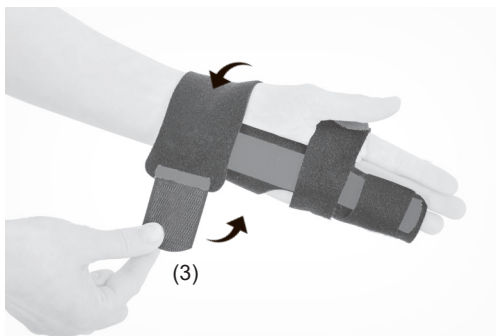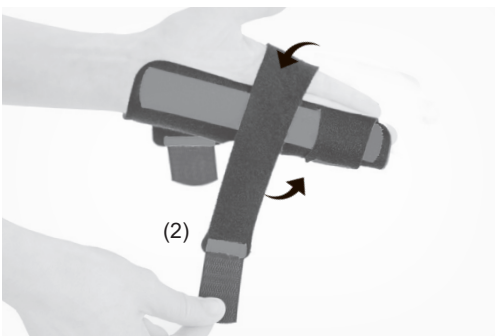

3. PL: Zapnij środkowy pasek (2).
EN: Fasten the middle strap (2).

3. PL: Zapnij pasek na nadgarstku (3).
EN: Fasten the wrist strap (3).



5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.