

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-19
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-19
CODE	FIX-KD-19
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-19




**1. PL:** Przed założeniem ortozy na kończynę, zegar powinien być ustawiony w określonym przez lekarza prowadzącego zakresie ruchomości stawu biodrowego.

**EN:** Before you put the brace on, the range of motion in the drop lock should be adjusted according to doctor's recommendations.




**2. PL:** Przyłóż ortezę do nogi.  
**EN:** Place the brace on your leg.

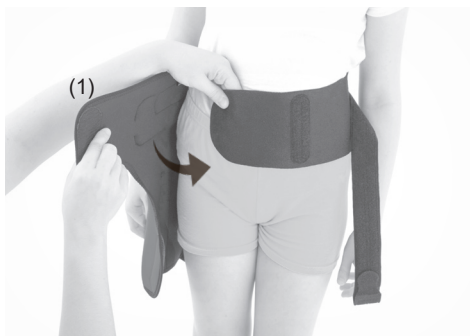

**3. PL:** Zapnij rzep (1).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (1).



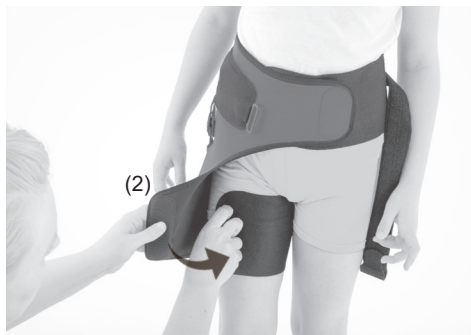

- 4. PL:** Zapnij rzep (2).  
**EN:** Fasten the Velcro closure (2).



- 5. PL:** Przepleć pasek przez klamerkę i zapnij na rzep (3) i (4).  
**EN:** Interlace the strap through the buckle and fasten with Velcro (3) and (4).



- 6. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.