

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-03
CODE	FIX-KD-03
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-03



1. PL: Odwiń dolny element ortozy w taki sposób, aby cała szerokość przedniego paska silikonowego znalazła się na zewnątrz ortozy.

EN: Unwrap the lower part of the brace, so that the entire width of the front silicone strap is outside the brace.



2. PL: Wciągnij ortezę na nóżkę dziecka do momentu, aż rzepka kolana znajdzie się na środku peloty ochronnej. Następnie odwiń dolny mankiet, aby pasek silikonowy znalazł się na skórze dziecka.

EN: Pull the brace over the child's leg until the kneecap is in the center of the protective pad. Then unfold the lower part of the brace, so that the silicone strap is on the child's skin.



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.