



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-31
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-31
CODE	FIX-KD-31
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-31

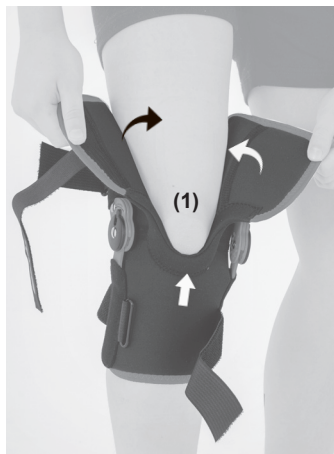

**1. PL:** Rozepnij paski, załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okolorzepakowym, a zegar znajdował się w osi stawu kolanowego. Następnie zapnij rzep (1).

**EN:** Unbuckle the straps, put the brace on your leg and pull it up so that the kneecap is in the patellar donut and the drop lock is in the axis of the knee joint. Then close the Velcro (1).

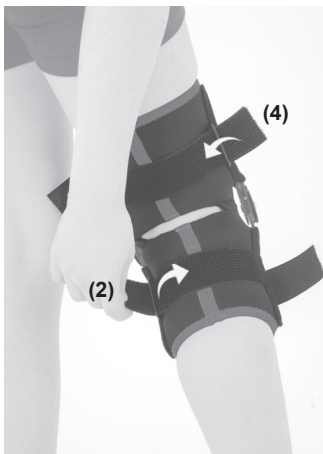

**2. PL:** Przepleć taśmy przez klamerki i zapnij w podanej kolejności (2,3,4,5).

**EN:** Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro according to the following steps (2,3,4,5).



**3. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.