


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-15
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-15
CODE	FIX-KG-15
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-15



- 1. PL:** Przyłóż ortezę do ręki i dopasuj stalkę do kciuka.  
**EN:** Place your hand on the brace.



- 2. PL:** Opleć nadgarstek według wskazanego kierunku i zapnij rzep (1).  
**EN:** Wrap your wrist in the indicated direction and fasten with Velcro (1).

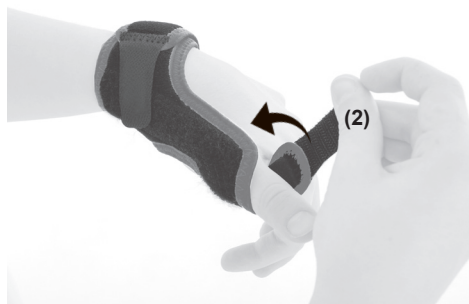

- 3. PL:** Zapnij rzep obwodowy kciuka (2).  
**EN:** Fasten the thumb wrap-around strap (2).



- 4. PL:** Gotowy wyrób.  
**EN:** Product is ready to use.