
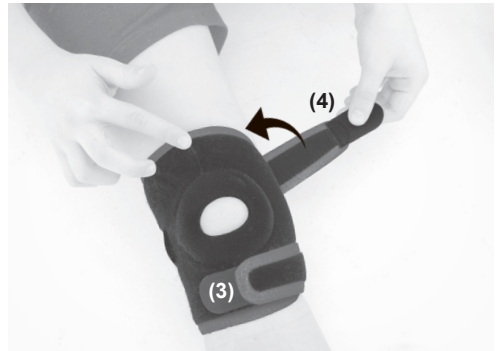


| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | FIX-KD-18 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KONCZYZNY DOLNEJ |
| MODEL | FIX-KD-18 |
| | |
| CODE | FIX-KD-18 |
| TRADE NAME | LOWER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | FIX-KD-18 |

1. PL: Przyłóż ortezę do nogi (1) w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzepkowym.

EN: Put the brace on your leg (1), keep the kneecap in the patellar donut.

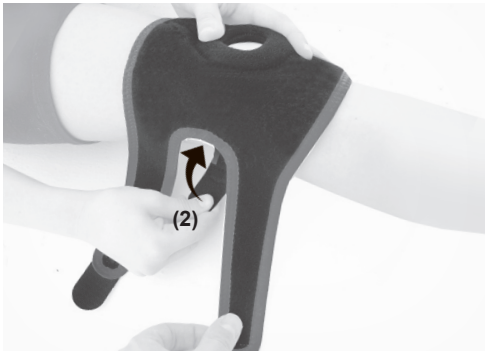

2. PL: Zapnij rzepy w podanej kolejności (2,3,4).

EN: Fasten the Velcro straps in the following order (2,3,4).



3. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.