
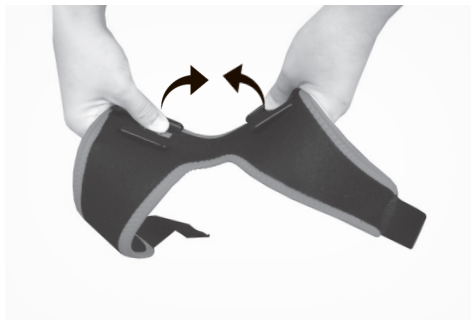




KOD KATALOGOWY	FIX-KG-16
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-16
CODE	FIX-KG-16
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-16

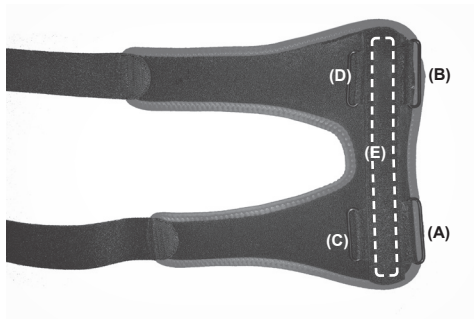



PL: A,B,C,D - klamkerki, E - stalka aluminiowa
EN: A,B,C,D - buckles, E - splint

1. PL: Ortezę należy ustawić w określonym przez lekarza prowadzącego kącie zgięcia. W tym celu, należy ukształtować stalkę aluminiową wraz z wyrobem do pożądanej pozycji ułożenia kończyny.

EN: The brace should be adjusted to the flexion angle specified by the doctor or physiotherapist. For this purpose, shape the aluminum stay to the desired position of the limb.

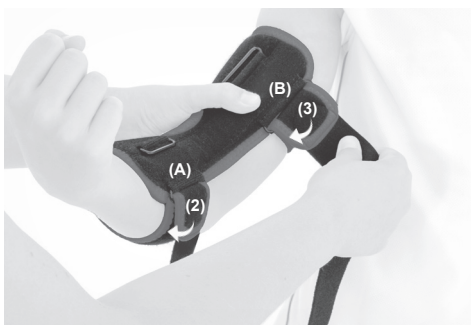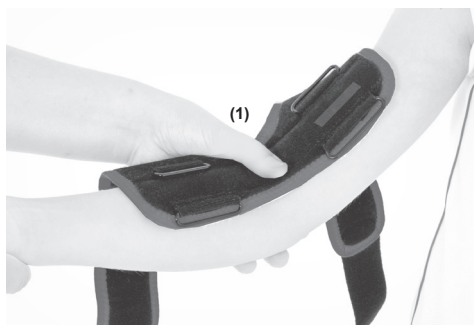

2. PL: Przyłóż ortezę do kończyny (1), przepleć paski przez klamry (A i B) i zapnij na rzepy (2 i 3).
EN: Place the brace on your limb (1), interlace the straps through the buckles (A i B) and fasten with Velcro (2 i 3).

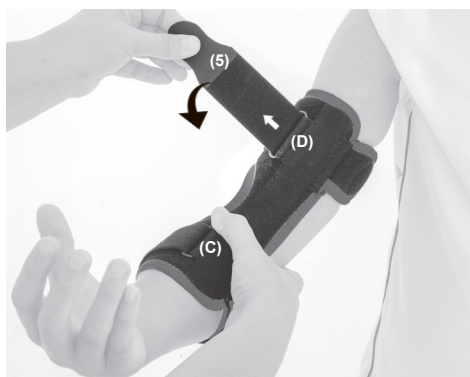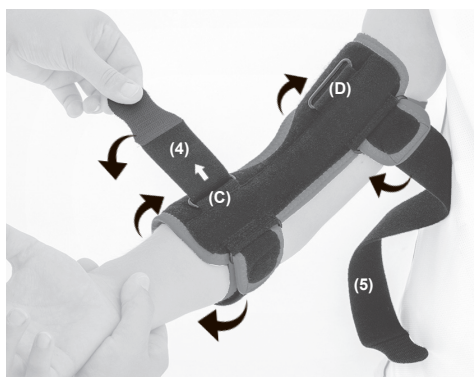

- 3. PL:** Owiń paski (4 i 5) wokół ramienia i przedramienia, przepleć je przez klamry (C i D) i zapnij na rzepy.
EN: Wrap the straps (4 and 5) around your arm, interlace them through the buckles (C and D) and fasten the Velcro.



- 4. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.