



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-35
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-35
CODE	FIX-KD-35
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-35

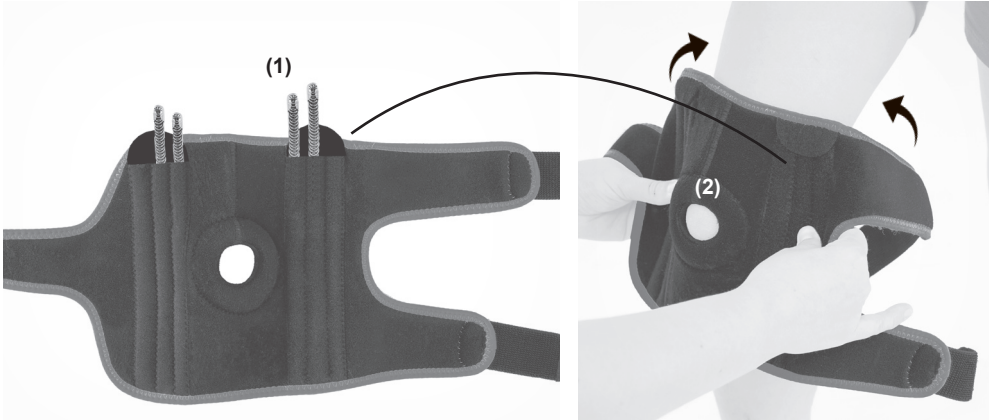


1. PL: Rozepnij ortezę. Umieść fiszbiny (1) we właściwym tunelu w zależności od obwodu kończyny dolnej.
EN: Unfasten the brace. Place the underwires (1) in the appropriate tunnel depending on the circumference of the lower limb.


2. PL: Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby rzepka znalazła się w otworze okołorzępkowym (2).
EN: Put the brace to your leg, keeping the kneecap in the patellar donut (2).

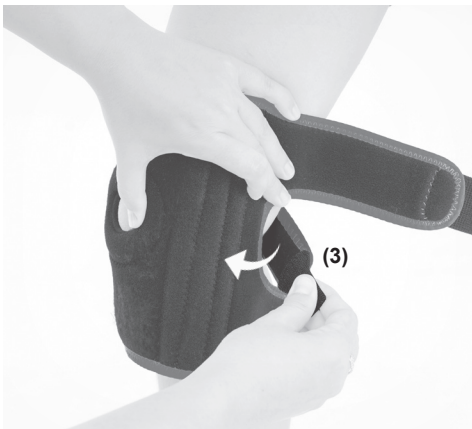

3. PL: Zapnij ortezę z tyłu na rzep (3).
EN: Close the brace on the back with Velcro (3).

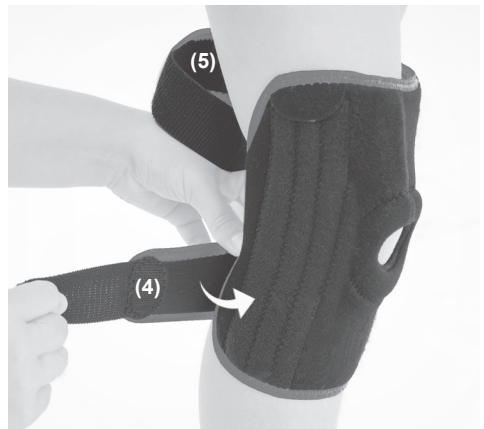

4. PL: Zapnij ortezę z tyłu na rzepy (4,5).
EN: Fasten the orthosis on the back with Velcro (4,5).

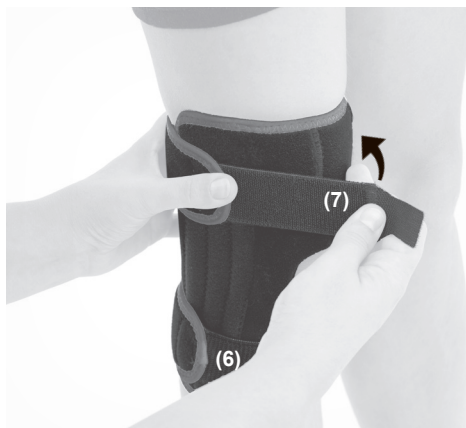

5. PL: Zapnij taśmy elastyczne (6,7) w podanej kolejności.

EN: Fasten the elastic bands (6,7) according to the following steps.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.