


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-17
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-17
CODE	FIX-KG-17
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-17

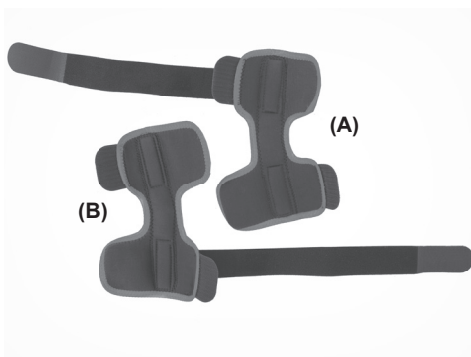


1. PL: Rozepnij ortezę za pomocą rzepów (A, B) dopasuj wyrób ortozy do kończyny górnej.
EN: Unfasten the orthosis with Velcro (A, B) and adjust it to the upper limb.



2. PL: Załóż ortezę na rękę w taki sposób, aby szyny ortozy przebiegały wzdłuż kłykci kości ramiennej.
EN: Put the brace on the limb, so that the side splints of the brace were placed along the condyles of the humerus.



3. PL: Zapnij przednią część ortozy na rzepy (1,2).
EN: Close the front part of the brace with Velcro (1,2).

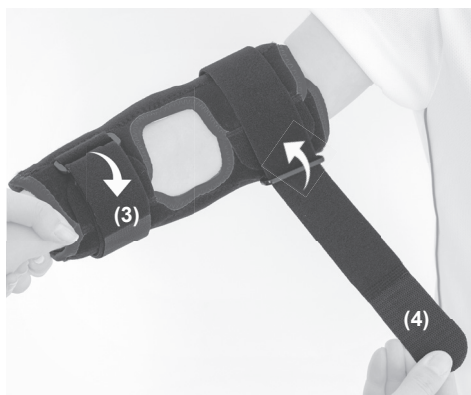

4. PL: Przepleć paski przez klamki i zapnij rzepy (3,4) według podanej kolejności.
EN: Interlace the straps through the buckles and fasten the Velcro (3,4) closures.



5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.