

| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | FIX-KD-42 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ |
| MODEL | FIX-KD-42 |
| | |
| CODE | FIX-KD-42 |
| TRADE NAME | LOWER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | FIX-KD-42 |



- 1. PL:** Załóż ortezę na nogę.
EN: Put the brace on the leg.



- 2. PL:** Zapnij górny rzep (1).
EN: Fasten the upper the Velcro (1).



- 3. PL:** Zapnij rzep (2) i opleć pas ATFL wokół stopy we wskazanym kierunku.
EN: Close the Velcro (2) and wrap the ATFL belt around your foot in the right direction.



- 4. PL:** Zapnij rzep (3).
EN: Fasten the Velcro (3).



- 5. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.