



KOD KATALOGOWY	FIX-T-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	FIX-T-05
CODE	FIX-T-05
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	FIX-T-05

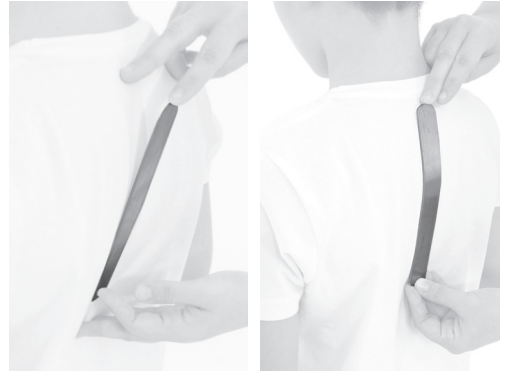

1. PL: Wyjmij usztywnienie (1) z ortozy. Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie je dopasować, w celu uzyskania pożądanego ustawienia ciała.

EN: Remove the steel (1) from the orthosis. Before putting the device on the patient, it is necessary to precisely adjust it, in order to reach the desired body stabilization.

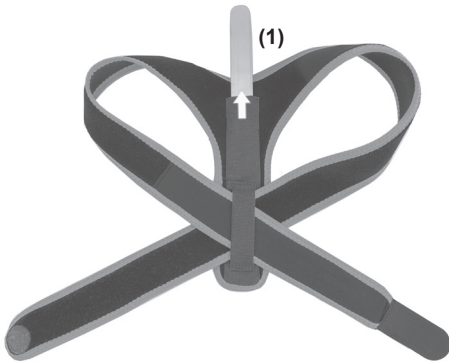

2. PL: Włóż ukształtowaną stalkę do tunelu (2) w taki sposób, aby uniemożliwić jej wysunięcie.

EN: Insert the shaped steel into the tunnel (2) in such a way as to prevent it from sliding out.



3. PL: Przyłóż ortezę do pleców i przelóż pasy (3) przez szlufkę (4).

EN: Place the orthosis against your back and put the straps (3) through the belt loop (4).



4. PL: Pociągając za pasy ustaw odpowiednią kompresję wyrobu.
EN: By pulling the straps, set the appropriate compression of the product.

5. PL: Zapnij pasy z przodu na rzep (5).
EN: Fasten the Velcro straps at the front (5).



6. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.