

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-01
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-01
CODE	FIX-KD-01
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-01



**1. PL:** Odwiń dolny element ortezy w taki sposób, aby cała szerokość przedniego paska silikonowego znalazła się na zewnątrz ortezy.

**EN:** Unwrap the lower part of the brace, so that the entire width of the front silicone strap is outside the brace.

**2. PL:** Załóż ortezę na nogę w taki sposób, aby rzepkę znalazła się w otworze okołorzępkowym (1).

**EN:** Put the brace on the leg to keep the kneecap in the patellar donut (1).



**3. PL:** Odwiń dolny element ortezy.

**EN:** Unwrap the lower part of the brace.

**4. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.