


KOD KATALOGOWY	FIX-KD-05
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KONCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-05
CODE	FIX-KD-05
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-05



1. PL: Rozepnij ortezę i przyłóż do kolana w taki sposób, aby znajdowała się pod rzepką.
EN: Unfasten the brace and place it on the leg, so that it is under the kneecap.

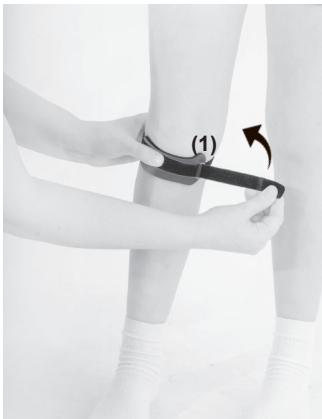

2. PL: Przepleć pasek przez klamerkę (1). Ustaw odpowiednie napięcie i zapnij rzep (2).

EN: Interlace the strap through the buckle (1). Set the correct tension and fasten the Velcro closure (2).



3. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

