

KOD KATALOGOWY	FIX-KD-42
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-42
CODE	FIX-KD-42
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-42





1. PL: Rozepnij ortezę i załóż na nogę.
EN: Unfasten the brace and put it on the leg.



2. PL: Zapnij górny rzep (1).
EN: Fasten the upper Velcro (1).



3. PL: Przypnij rzep stabilizujący (2) do bocznej części ortezi i opleć pas ATFL (3) wokół stopy we wskazanym kierunku.
EN: Attach the stabilizing Velcro (2) to the side of the brace and wrap the ATFL belt (3) around your foot in the direction shown.

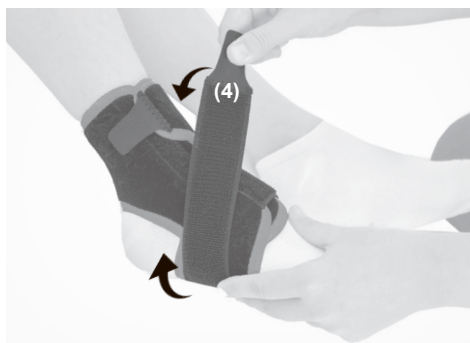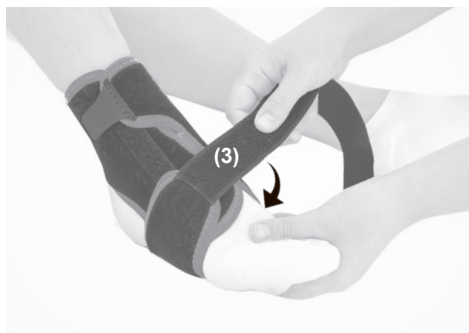

4. PL: Zapnij pas na rzep (4) w górnej części ortezi.
EN: Fasten the Velcro strap (4) on the top of the brace.



5. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.