



| | |
|----------------|-------------------------|
| KOD KATALOGOWY | FIX-KG-05 |
| NAZWA HANDLOWA | ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| MODEL | FIX-KG-05 |
| | |
| CODE | FIX-KG-05 |
| TRADE NAME | UPPER-EXTREMITY SUPPORT |
| MODEL | FIX-KG-05 |

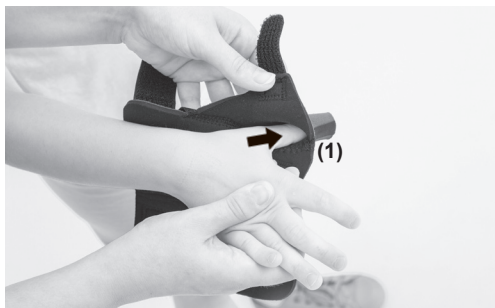

1. **PL:** Rozepnij ortezę i umieść kciuk w otworze (1).
EN: Unfasten the brace and put the thumb in the special opening (1).



2. **PL:** Dopasuj usztywnienia (2,3) do dłoni. **Uwaga!** Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu lub innej części ciała.
EN: Adjust the stiffenings (2,3) to the hand. **Attention!** Before putting the brace on a patient, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint or other part of the body.

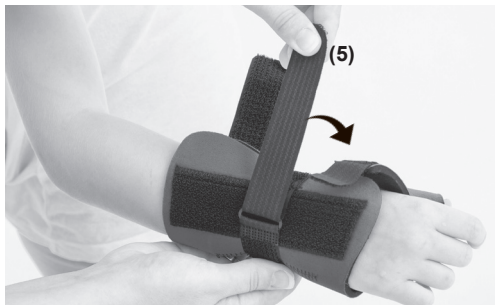

3. **PL:** Przełóż pasek nadgarstka we wskazanym kierunku (4), przepleć przez klamrę i zapnij na rzep (5).
EN: Pass the wrist strap in the direction shown (4), interlace it through the buckle and fasten with Velcro (5).



4. PL: Zapnij rzep przedramienia (6) and śródreńca (7).

EN: Close the Velcro on the forearm (6) and the metacarpal (7).



5. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.