


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-15
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-15
CODE	FIX-KG-15
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-15



1. PL: Rozepnij ortezę, przyłóż do ręki i dopasuj usztywnienie do kciuka.


Uwaga! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia zainstalowane w ortezie w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu.

EN: Unfasten the brace and place it on your hand. **Attention!** Before putting the brace on a patient's limb, it is necessary to precisely adjust all the elements installed in the product in order to obtain the desired positioning of the secured joint.

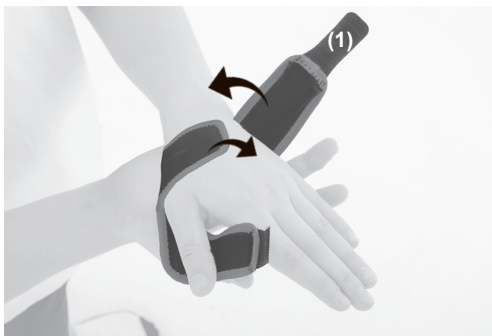

2. PL: Opleć nadgarstek według wskazanego kierunku i zapnij w nadgarstku na rzep (1).

EN: Wrap the wrist around in the direction shown and fasten it with Velcro (1).

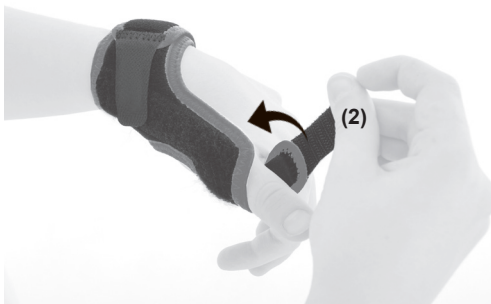

3. PL: Zapnij rzep obwodowy kciuka (2).

EN: Fasten the thumb wrap-around strap (2).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.

