



KOD KATALOGOWY	FIX-KD-12
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	FIX-KD-12
CODE	FIX-KD-12
TRADE NAME	LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KD-12

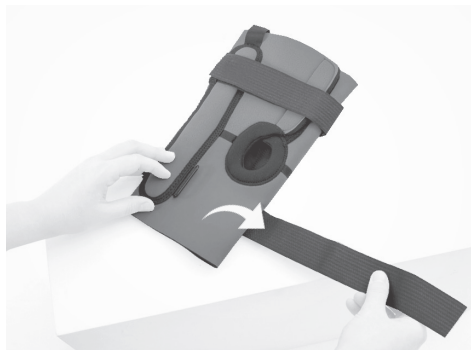

- 1. PL:** Wyciąć paski z klamerek i rozepnij ortezę.
EN: Remove the straps from the buckles and unfasten the brace.

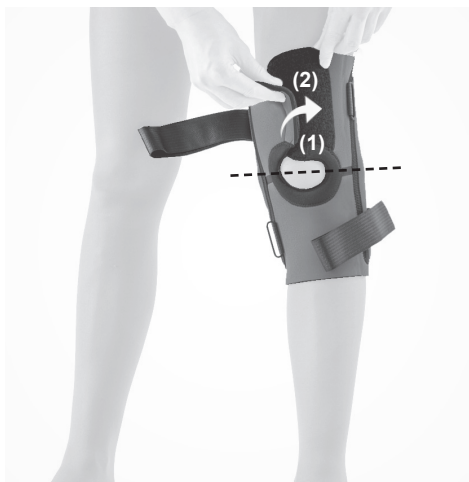

- 2. PL:** Załóż ortezę na nogę i podciągnij do góry w taki sposób, aby rzepka (1) znalazła się w otworze okołorzepkowy, a zawiasy szyny znajdowały się w osi stawu kolanowego. Zapnij ortezę na rzep (2).
EN: Put the brace on the leg and pull it up, so that the kneecap (1) is in the patellar donut and the splint hinges are in the axis of the knee joint. Fasten the Velcro (2).



3. PL: Przepleść taśmy przez klamry i zapnij w podanej kolejności (3,4).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten in the given order (3,4).



4. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.