


KOD KATALOGOWY	FIX-KG-14
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	FIX-KG-14
CODE	FIX-KG-14
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	FIX-KG-14

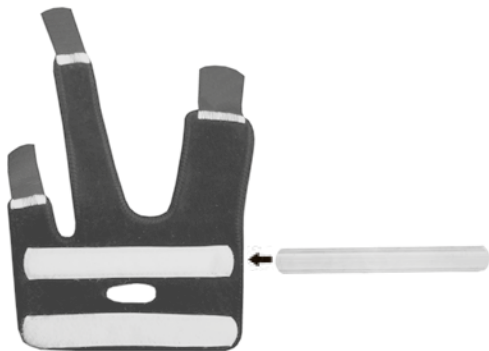

PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW

II-III RĘKI LEWEJ

III-IV RĘKI PRAWYJ

IV-V RĘKI PRAWYJ

EN: IMMOBILIZATION OF FINGERS

II-III LEFT HAND

III-IV RIGHT HAND

IV-V RIGHT HAND



PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW

III-IV RĘKI LEWEJ

IV-V RĘKI LEWEJ

II-III RĘKI PRAWYJ

EN: IMMOBILIZATION OF FINGERS

III-IV LEFT HAND

IV-V RIGHT HAND

II-III RIGHT HAND


1. PL: Rozepnij ortezę, wyjmij usztywnienie z tunelu, dopasuj je do ręki i wsuń w odpowiedni tunel według powyższych informacji.

EN: Unfasten the brace, remove the splint from the pocket, adjust it to your hand and insert it into the appropriate pocket according to the above information.

PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW II-III RĘKI LEWEJ
EN: FINGERS IMMOBILIZATION II-III LEFT HAND




2. PL: Umieść kciuk w otworze.
EN: Place your thumb in the hole.

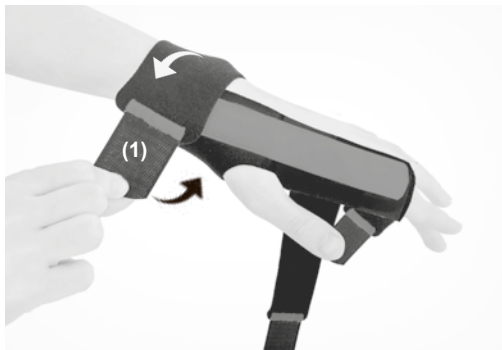

3. PL: Zapnij pasek nadgarstka na rzep (1).
EN: Fasten the Velcro wrist strap (1).



4. PL: Owiń najkrótszy pasek ortozy dookoła palca wskazującego i środkowego, następnie zapnij na rzep (2).
EN: Wrap the shortest strap of the brace around your index and middle fingers, then close the Velcro fastener (2).

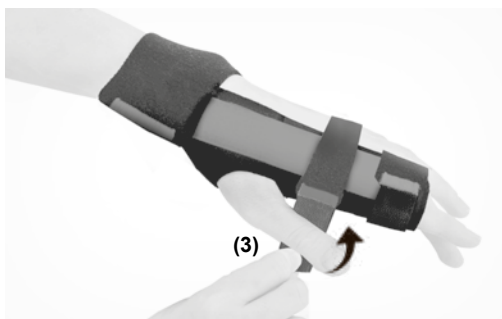

5. PL: Zapnij pasek śródrečza na rzep (3).
EN: Fasten the metacarpal strap with Velcro (3).




6. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.



PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW III-IV RĘKI LEWEJ
EN: FINGERS IMMOBILIZATION III-IV LEFT HAND



2. PL: Umieść mały palec w otworze.
EN: Place the little finger in the hole.

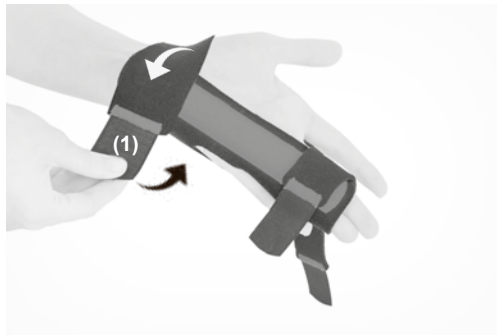

3. PL: Zapnij pasek nadgarstka na rzep (1).
EN: Fasten the Velcro wrist strap (1).



4. PL: Owiń najkrótszy pasek ortozy dookoła palca środkowego i serdecznego, następnie zapnij na rzep (2).
EN: Wrap the shortest strap of the brace around your middle and ring fingers, then fasten with Velcro (2).



5. PL: Zapnij pasek śródreżca na rzep (3).
EN: Fasten the metacarpal strap with Velcro (3).




6. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.



PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW IV-V RĘKI LEWEJ
EN: FINGERS IMMOBILIZATION IV-V LEFT HAND



2. PL: Umieść ostatnie dwa palce w ortezie.
EN: Place the last two fingers in the brace.

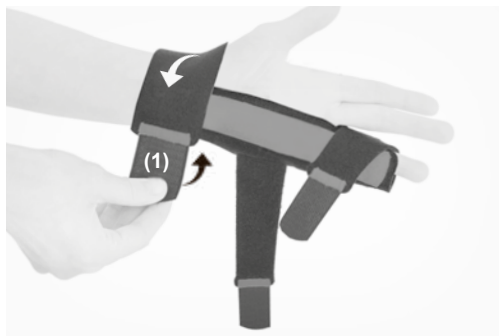

3. PL: Zapnij pasek nadgarstka na rzep (1).
EN: Fasten the Velcro wrist strap (1).



4. PL: Owiń najkrótszy pasek ortezy dookoła małego i serdecznego palca, następnie zapnij rzep (2).
EN: Wrap the shortest strap of the brace around the little and ring fingers, then close the Velcro fastener (2).



5. PL: Zapnij pasek śródreçca na rzep (3).
EN: Fasten the metacarpal strap with Velcro (3).



6. PL: Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.

