

KOD KATALOGOWY	FIX-T-03
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA TUŁOWIA
MODEL	FIX-T-03
CODE	FIX-T-03
TRADE NAME	TORSO SUPPORT
MODEL	FIX-T-03




- 1. PL:** Rozepnij ortezę i przyłóż do pleców (1).
EN: Unfasten the brace and place it on the patients back (1).



- 2. PL:** Zapnij przednią część ortozy na rzep (2) ustawiając odpowiednią kompresję.
EN: Fasten the Velcro closure (2) setting the appropriate compression.

- 3. PL:** Przypnij rzep (3) z pasami elastycznymi do tyłu ortozy na odpowiedniej wysokości.
EN: Attach the Velcro (3) with the elastic straps to the back of the brace at the appropriate height.



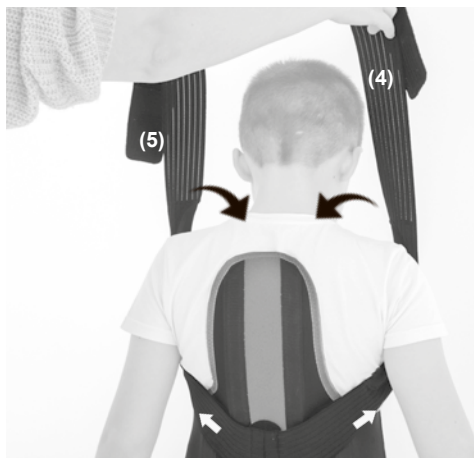

4. PL: Przelóż pasy (4 i 5) pod pachami i przez ramiona i ustaw odpowiednią kompresję. Następnie skrzyżuj je na plecach (6).

EN: Pass the straps (4 and 5) under the armpits and over the shoulders adjusting the compression. Then cross them over your back (6).

5. PL: Przypnij rzepy (7, 8) do przedniej części ortozy ustawiając odpowiednią kompresję.

EN: Attach the Velcro fasteners (7, 8) to the front part of the brace setting the appropriate compression.



6. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.